

HINWEIS: Diese Anleitung informiert Sie darüber, wie Sie den macu4™ Explorer Schaft mit einer an der Innenseite des Schaftes befestigten Bandage verwenden können. Um einen stabileren Sitz des Schaftes am Arm zu erreichen, kann eine faltbare Bandage als Zusatzlösung verwendet werden. Dies kann bereits bei Aktivitäten mit Zugkräften in Richtung des Arms von Vorteil sein, z. B. beim Schwimmen. Sie kommt auch Menschen mit einem kurzen Schaft oder einer konischen Armform zugute.

1. Spezifikationen

Die in Betracht gezogene Bandage muss richtig auf Ihren Ellenbogen passen. Sehen Sie sich das ergänzende Video an, um zu erfahren, wie Sie die Bandage anlegen. Wenden Sie sich an support@macu4.com, wenn Sie Fragen zu den Anweisungen haben.

2. Vorbereitungen




Schritt 1 - Überprüfung des selbstklebenden Klettverschlusses

Um die Innenbandage im Schaft zu platzieren, ist der bereits angebrachte selbstklebende Klettverschluss auf der Innenseite des Schaftes erforderlich. Sollte dies nicht der Fall sein, bringen Sie das selbstklebende Klettband wie in der Illustration gezeigt an.


3. Anlegen des Verbandes

Befolgen Sie die Schritte, die in der offiziellen *Gebrauchsanweisung für den Schaft* beschrieben sind:

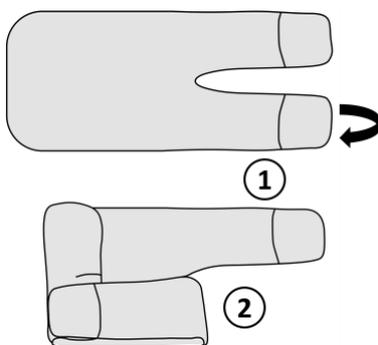


Schritt 2 – Vorbereiten der Bandage

Schneiden Sie die Bandage zurecht. Nehmen Sie ein Ende der Bandage (1). Falten Sie es, bis der Klettverschluss auf der Rückseite der Binde befestigt ist (2). Nun können Sie die Bandage in den Schaft einführen (die geschlossene Seite ist eingelegt).

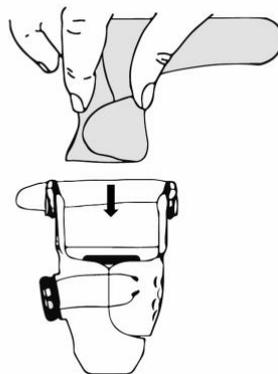

Schritt 3 - Einführen der Bandage


Sie können die Bandage leicht andrücken, um das Einführen zu erleichtern, ohne die Klettstreifen zu berühren. Führen Sie die Bandage nur so weit ein, bis noch 1 cm des geschlossenen Bandagenteils am Schafttrand sichtbar ist.

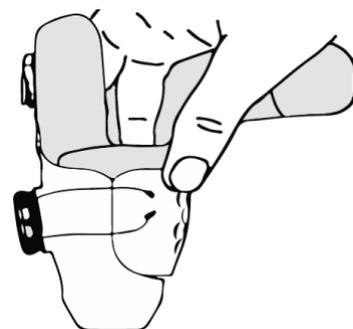

Schritt 4 - Fixieren der Bandage


Drücken Sie die Bandage schrittweise an die Schaftwand, so dass sie an den Klettstreifen befestigt wird. Achten Sie darauf, dass sie richtig positioniert und fixiert ist.

4. Schaft anziehen

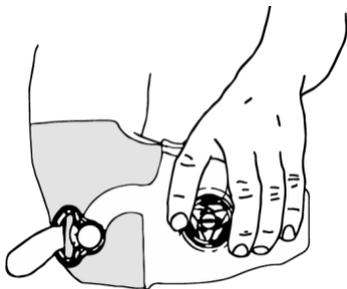


Schritt 5 - Anziehen des Schaftes

Führen Sie Ihren Arm in den Schaft ein, indem Sie Ihren Arm in die Bandage einführen. Achten Sie darauf, dass ihr Arm bequem im Schaft sitzt.

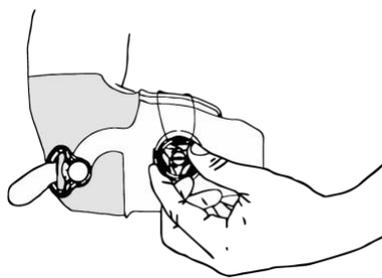


Schritt 6 - Schließen des Schnürsystems

Drehen Sie den Schnürungsknopf im Uhrzeigersinn, um das Schnürsystem festzuziehen. Drehen Sie, bis der Schaft fest auf dem Arm sitzt. Der Sitz des Schaftes am Arm sollte fest, aber nicht unangenehm sein.

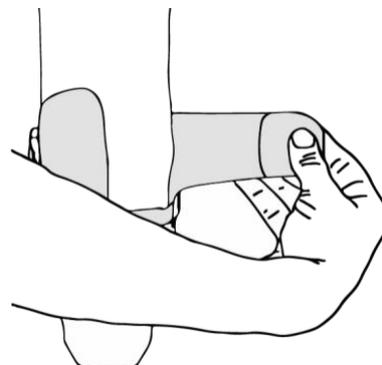


Schritt 7 - Schließen der Bandage

Schließen Sie die Bandage oberhalb des Ellenbogens. Falten Sie das Bandagenende über Ihren Arm und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss auf der anderen Seite.

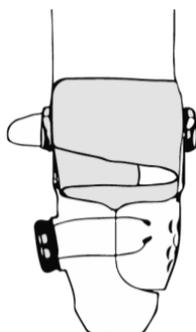

Schritt 8 - Endkontrolle

Kontrollieren Sie die Positionierung des Verbandes. Achten Sie darauf, dass der Verband zusammen mit dem Schaft keine möglichen Beschwerden auf Ihrer Haut verursacht.

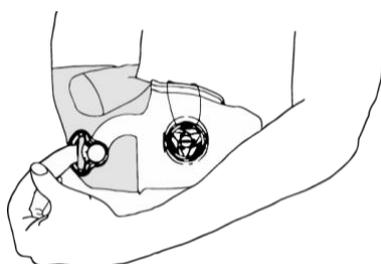

Schritt 9 - Klettverschluss schließen

Verwenden Sie den Klettverschluss der Kondylenspannen, um den Schaft auf der Rückseite und oberhalb des Ellenbogens zu schließen. Dadurch wird ein festerer Sitz auf dem Arm erreicht.

5. Endkontrolle

- Überprüfen Sie den Sitz des Schaftes, bevor Sie eine Aktivität beginnen.
- Vergewissern Sie sich, dass er gut positioniert und gesichert ist, indem Sie versuchen, den Schaft vorsichtig zu bewegen.
- Beachten Sie, dass der Schaft fest in seiner Position bleiben soll.
- Wenn er nicht richtig angezogen ist, sollten Sie das Schnürsystem, den Klettverschluss und die Bandage überprüfen.

Kontakt: macu4 AG, Rämistrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz, support@macu4.com