


Quick Guide | Vermessung

Das Lynk System - Maßband Technik

Größenbestimmung der Lynk Manschette


Die Größe der Manschette kann mittels Schablonen-Technik oder Maßband erfolgen.

SCHRITT 1 | Länge der Manschette

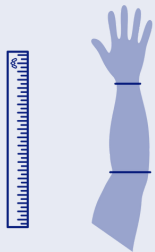

- Messe die Länge zwischen Handgelenk und Ellbogen.
- Länge (L) < 140mm, dann ist der Arm zu kurz für die kleinste Manschettengröße. Kontaktiere support@macu4.com
- Länge (L) liegt zwischen 140mm und 200mm, dann ist die Manschette SHT (kurz) empfohlen.
- Länge (L) ist größer als 200mm, dann ist die Manschette LRG (groß) empfohlen.

SCHRITT 2 | Umfang der Manschette

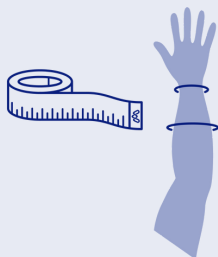

- Messung 1 erfolgt im Bereich des Handgelenks.
- Messung 2 erfolgt im Bereich 10cm proximal vom Handgelenk.

MAßTABELLE | Manschettengröße gemäß Umfang

	Umfang Handgelenk (distal) (mm)		Umfang 10 cm proximal von Handgelenk entfernt (mm)	
	min	max	min	max
Klein (S)	130	150	140	190
Mittel (M)	150	180	190	240
Groß (L)	180	200	240	330

Quick Guide | Vermessung

Das Lynk System - Schablonen Technik



Wie man die Vorlage richtig verwendet

- Drucke die Vorlage auf ein A4-Papier. Druckeinstellungen: 100% und keine Skalierung oder Anpassung der Passform.
- Lege die Mitte deines Handgelenks auf das Logo.
- Lege Deinen Arm immer sanft auf die Schablone.
- Drücke deinen Arm nicht auf die Vorlage. Dies kann dazu führen, dass die Manschette größer als nötig ausfällt.

SCHRITT 1 | Größe des Umfangs der Manschette

- Vergewissere dich, dass die Mitte deines Handgelenks auf dem Logo und dein Arm entspannt auf der Vorlage liegt.
- Konzentriere dich auf den farbigen Balken (SCHRITT 1), der rechts und links von deinem Handgelenk erscheint.
- Schaue, welches Farbsegment rechts und links von deinem Arm erscheint. Das Farbsegment zeigt dir eine der verfügbaren Manschettengrößen an (S, M, L).
- Du kannst das richtige Farbsegment am besten erkennen, wenn du deinen Kopf senkrecht über dein Handgelenk hältst.
- Mache weiter mit SCHRITT 2. Das Ziel ist es, zu bestätigen, dass die Größe aus SCHRITT 1 korrekt ist.

SCHRITT 2 | Manschettenumfang bestätigen

- Lasse deinen Arm nach wie vor auf der Vorlage.
- Konzentriere dich nun auf den zweiten farbigen Balken (SCHRITT 2).
- Schaue, welches Farbsegment rechts und links von deinem Arm erscheint.

In manchen Fällen zeigt dir das Farbsegment eine größere Manschettengröße an als unter SCHRITT 1 oder es ist schwierig, die Größe eindeutig zu identifizieren. Mache ein Foto von deinem Arm, während er auf der Schablone liegt und kontaktiere uns über support@macu4.com

SCHRITT 3 | Länge der Manschette

- Lege die Mitte deines Handgelenks auf das Logo
- Ermittle die Position deines Ellenbogens. Sie zeigt dir, welche Manschettenlänge benötigt wird.
- Liegt dein Arm zwischen den beiden gestrichelten Linien, benötigst du die Länge KURZ.
- Befindet sich dein Arm unterhalb der zweiten gestrichelten Linie, benötigst du die Länge STANDARD.
- Wenn dein Ellenbogen oberhalb der ersten gestrichelten Linie liegt, kontaktiere uns!