

NOTA: Estas instrucciones le indican cómo utilizar el encaje macu4™ Explorer con una venda sujeta al interior del encaje. Para conseguir un ajuste más estable del encaje en el brazo, se puede utilizar un soporte plegable como solución adicional. Esto ya puede ser ventajoso para actividades con fuerzas de tracción en la dirección del brazo, por ejemplo, la natación. También beneficia a las personas con un encaje corto o una forma cónica del brazo.

1. Especificaciones

La ortesis que está considerando debe ajustarse correctamente a su codo. Vea el vídeo complementario para aprender a colocar la ortesis. Póngase en contacto con support@macu4.com si tiene alguna duda sobre las instrucciones.

2. Preparativos




Paso 1 - Comprobación de la cinta autoadhesiva

Para colocar el vendaje interior en la parte superior es necesario que el cierre de velcro autoadhesivo ya esté colocado en el interior de la parte superior. En caso contrario, coloque la cinta de velcro autoadhesiva como se muestra en la ilustración.


3. Aplicación del vendaje

Siga los pasos descritos en las *instrucciones de uso* oficiales del encaje:

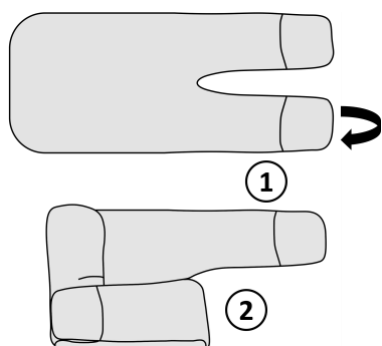


Paso 2 - Preparación del vendaje

Corte el vendaje a medida. Tome un extremo del vendaje (1). Dóblelo hasta que el cierre de velcro quede pegado a la parte posterior del vendaje (2). Ahora puede introducir el vendaje en el encaje (el lado cerrado queda insertado).

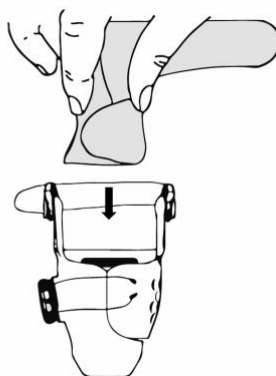

Paso 3 - Colocación de


Puede presionar ligeramente el vendaje para facilitar su inserción sin tocar las tiras de velcro. Introduzca el vendaje sólo hasta que quede visible 1 cm de la parte cerrada del vendaje en el borde de la pierna.

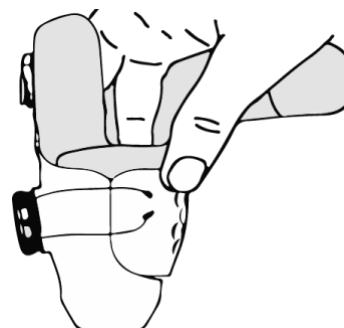

Paso 4 - Fijación del vendaje


Presione gradualmente el vendaje contra la pared del encaje para que se fije a las tiras de velcro. Asegúrese de que está correctamente colocada y fijada en su sitio.

4. Apriete el encaje

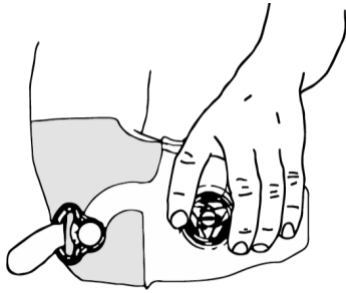


Paso 5 - Apriete del encaje

Introduzca el brazo en el encaje introduciendo el brazo en el soporte. Asegúrese de que el brazo se asienta cómodamente en el encaje.

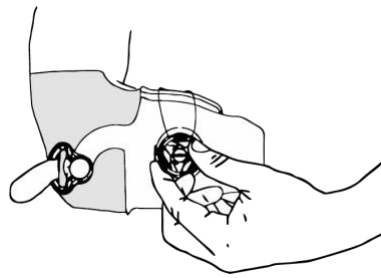


Etapa 6 - Cierre del sistema de cordones

Gire la perilla de cordones en el sentido de las agujas del reloj para apretar el sistema de cordones. Gire hasta que el encaje quede firmemente asentado en el brazo. El ajuste del encaje en el brazo debe ser firme pero no incómodo.

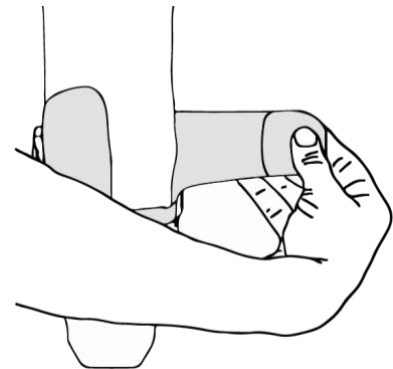


Paso 7 - Cierre del vendaje

Cierra el vendaje por encima del codo. Dobra el extremo del vendaje sobre el brazo y sujétala con el cierre de velcro del otro lado.

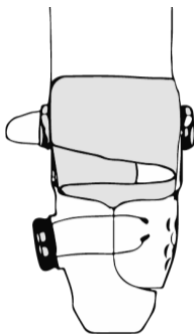

Etapa 8 - Inspección final

Comprueba la colocación del vendaje. Asegúrese de que el vendaje junto con el encaje no le produce ninguna molestia en la piel.

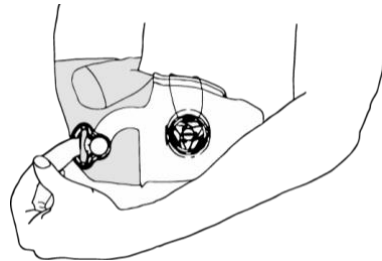

Paso 9 - Cerrar el cierre de velcro

Utilice el cierre de velcro de los tirantes condilares para cerrar el encaje en la parte posterior y por encima del codo. Esto asegura un ajuste más ceñido al brazo.

5. Inspección final

- Comprueba el ajuste del encaje antes de iniciar una actividad.
- Asegúrese de que está bien colocado y sujeto intentando mover el encaje con cuidado.
- Tenga en cuenta que el encaje debe permanecer firmemente en su posición.
- Si no está bien apretado, debes comprobar el sistema de cordones, el cierre de velcro y el vendaje.