

REMARQUE : Cette notice vous explique comment utiliser l'emboiture Explorer de macu4 avec un bandage inséré et fixé sur la partie interne de l'emboiture. En effet, un bandage souple peut être utilisé comme solution complémentaire pour obtenir un ajustement plus stable de l'emboiture sur votre bras. Cela peut s'avérer très utile pour des activités impliquant des forces de traction dans l'axe du bras, comme la natation. Cette solution est également avantageuse pour les personnes ayant une emboiture courte ou un bras de forme conique.

1. Spécifications

Le bandage doit s'adapter correctement à votre coude. Vous pouvez consulter la vidéo complémentaire sur l'utilisation du bandage. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@macu4.com si vous avez des questions concernant les instructions.

2. Préparatifs




Étape 1 - Vérifier le velcro autocollant

Pour placer le bandage à l'intérieur de l'emboiture, il est nécessaire que le Velcro autocollant soit déjà fixé sur la face interne de l'emboiture. Si ce n'est pas le cas, placez le Velcro autocollant comme indiqué dans les documents mentionnés ci-dessus.


3. Installer le bandage

Suivez les étapes décrites dans la *Notice d'utilisation* de l'emboiture :

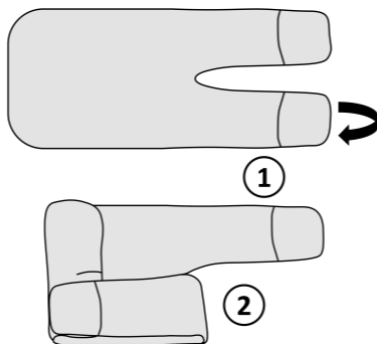


Étape 2 - Préparer le bandage

Ajustez le bandage en le découpant si nécessaire. Prenez une extrémité du bandage (1). Rabattez-la sur la partie velcro à l'arrière du bandage pour la fixer (2). Vous pouvez maintenant insérer le bandage dans l'emboiture (c'est le côté fermé qui est inséré).

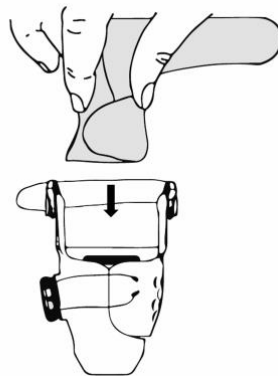

Étape 3 - Mettre en place le bandage




Appuyez légèrement sur le bandage pour faciliter son insertion, sans toucher le velcro. Assurez-vous que la partie fermée du bandage est encore visible d'1 cm au niveau du bord de l'emboiture.

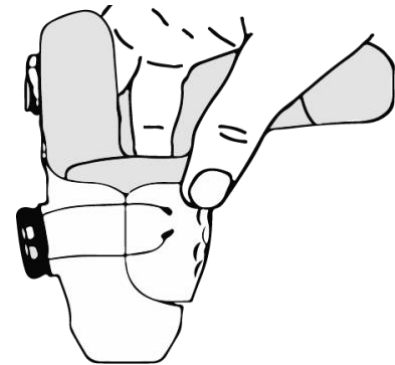

Étape 4 - Fixer le bandage

Pressez délicatement le bandage contre la paroi de l'emboiture pour le fixer au velcro. Veillez à ce qu'il soit correctement positionné et fixé.

4. Enfiler l'emboîture

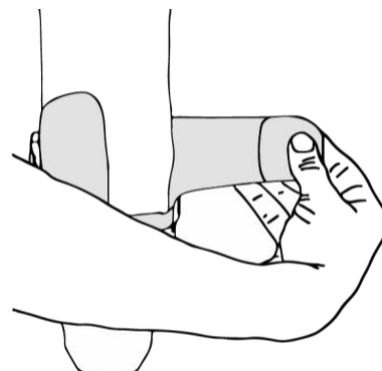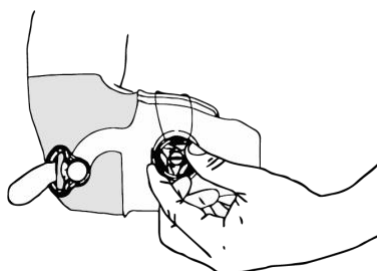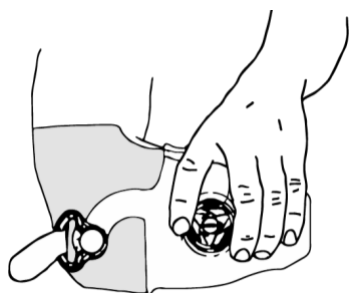

Étape 5 - Enfiler l'emboîture



Insérez votre bras dans le bandage jusqu'à ce qu'il soit confortablement positionné dans l'emboîture.

Étape 6 - Fermer le système de laçage

Tournez le bouton de laçage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le système de laçage. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que l'emboîture soit bien ajustée à votre bras, sans être inconfortable.

Étape 7 - Fermer le bandage

Fermez le bandage au-dessus de votre coude. Rabattez l'extrémité du bandage sur le Velcro de l'autre côté de votre bras pour la fixer.

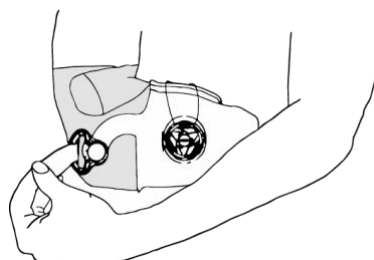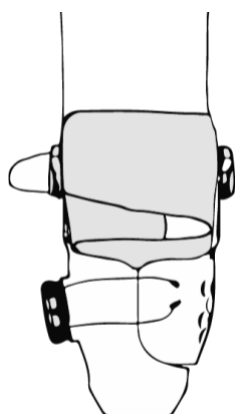

Étape 8 - Dernière vérification

Contrôlez la position de l'emboîture. Assurez-vous que le bandage et l'emboîture ne provoquent aucune gêne sur votre peau.

Étape 9 - Ajuster avec le Velcro

Utilisez le Velcro des Clips Condylens pour fermer l'emboîture à l'arrière et au-dessus de votre coude. L'ajustement sera ainsi plus serré.

5. Contrôle final

- Vérifiez l'ajustement de l'emboîture avant de commencer toute activité.
- Assurez-vous qu'elle est bien positionnée et fixée en essayant de la déplacer doucement.
- L'emboîture doit rester fermement en place.
- Si elle n'est pas assez serrée, vérifiez le système de laçage, la fermeture Velcro et le bandage.

6. Contact :

macu4 GmbH, Bücklestrasse 3, 78467 Constance, Allemagne