

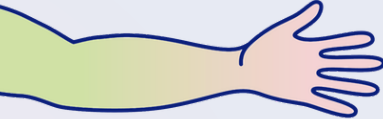
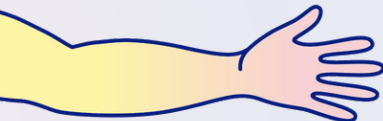
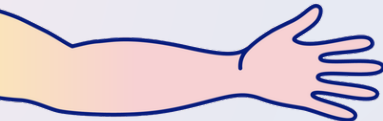
Quick Guide | Checklist zu Bewertung



Das Lynk System

Anwendung dieses Leitfadens

Bewerte die Eignung des Lynk Systems für Patienten anhand der funktionellen Anforderungen. Nutze die nachfolgende Übersicht, um das passende Anwenderprofil zu identifizieren. In der Spalte „Bewertung“ wird aufgezeigt, in welchem Umfang das Lynk System als Hilfsmittel eingesetzt werden kann.

	Anwenderprofil	Beispiel	Ergänzungen	Bewertung
	Personen mit Hand-/Handgelenkeinschränkungen bei uneingeschränkter Ellenbogen- und Schulterfunktion.	Periphere Nervenläsion	Bei schlaffer Lähmung oder Spastik im Bereich von Handgelenk oder Hand ermöglicht das Rest Modul eine zusätzliche Positionierung der Hand.	Geeignet Bei vollständiger Kontrolle von Arm und Schulter unterstützt das System Anwenderinnen und Anwender mit isolierten funktionellen Einschränkungen der Hand oder des Handgelenks.
	Personen mit Hand-/Handgelenkeinschränkungen und leichten Einschränkungen von Ellenbogen und/oder Schulter.	Rheumatoide Arthritis der oberen Extremität		Teilweise geeignet Bei leichten Einschränkungen von Arm und Schulter kann das System unterstützend bei leichten, geführten Aktivitäten eingesetzt werden, z. B. beim Essen oder bei einfachen Zubereitungstätigkeiten.
	Personen mit Hand-/Handgelenkeinschränkungen und ausgeprägten Einschränkungen von Schulter und Ellenbogen.	Hohe zervikale Rückenmarkverletzung		Eingeschränkt geeignet Bei schweren Einschränkungen von Arm und Schulter ist der Einsatz auf ausgewählte, stark kontrollierte Aktivitäten begrenzt.