Guía rápida | Medición



El Sistema Lynk | Medición con ayuda de cintas métricas

Tamaño del manguito Lynk

El tamaño del manguito puede determinarse utilizando la técnica de la plantilla o una cinta métrica.



PASO 1 | Longitud del manguito

- Mide la longitud entre la muñeca y el codo.
- Si la longitud (L) es < 120 mm, entonces el brazo es demasiado corto para la talla de manguito más pequeña. Contacto support@macu4.com
- Si la longitud (L) está entre 120 mm y 200 mm, entonces se recomienda el manguito SHT (corto).
- Si la longitud (L) es superior a 200 mm, se recomienda el manguito STD (estandard).



PASO 2 | Circunferencia del manguito

- La medición 1 se toma en la zona de la muñeca.
- La medición 2 se toma en la zona de 10 cm proximal a la muñeca.

TABLA DE TALLAS | Talla del manguito

	Circunferencia de la muñeca (distal) (mm)		Circunferencia a 10 cm proximal de la muñeca (mm)	
	min	max	min	max
Extra Chico (XS)	110	130	120	170
Chico (S)	130	150	140	190
Medio (M)	150	180	190	240
Grande (L)	180	200	240	330