

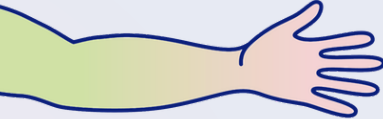
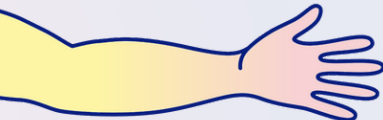
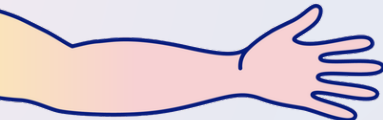
Guide rapide | Checklist d'évaluation



Le Système Lynk

Comment utiliser ce guide

Évaluez l'adéquation du système Lynk pour vos patient·e·s en fonction de leurs besoins fonctionnels. Appuyez-vous sur l'aperçu ci-dessous pour identifier le profil d'utilisateur le plus adapté. La colonne « Évaluation » précise dans quelle mesure le système Lynk peut être recommandé et utilisé comme dispositif de soutien.

	Profil de l'utilisateur·rice	Exemple	Compléments	Évaluation
	Personnes présentant des limitations au niveau du poignet et/ou de la main, avec une fonction du coude et de l'épaule préservée.	Lésion nerveuse périphérique	En cas de paralysie flasque ou de spasticité au niveau du poignet ou de la main, le Module Rest permet un positionnement supplémentaire de la main.	Adapté En cas de contrôle complet du bras et de l'épaule, le système accompagne les utilisatrices et utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles isolées de la main ou du poignet.
	Personnes présentant des limitations de la main et/ou du poignet, ainsi que de légères limitations du coude et/ou de l'épaule.	Polyarthrite rhumatoïde du membre supérieur		Partiellement adapté En présence de légères limitations du bras et de l'épaule, le système peut soutenir des activités légères et guidées, telles que manger ou la préparation simple des repas.
	Personnes présentant des limitations de la main et/ou du poignet, ainsi que des limitations marquées de l'épaule et/ou du coude.	Lésion médullaire cervicale haute		Adaptation limitée En cas de limitations sévères du bras et de l'épaule, l'utilisation se limite à certaines activités ciblées et étroitement contrôlées.