

Guide Rapide | Prise de mesures




Le Système Lynk | Méthode du mètre-ruban

Déterminer la taille de la Manchette


La taille de la Manchette peut être déterminée à l'aide de la méthode du mètre-ruban ou de celle du gabarit.

ÉTAPE 1 | Longueur de la Manchette

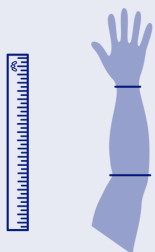

- Mesurez la longueur entre le poignet et le coude.
- Longueur (L) < 120mm, dans ce cas le bras est trop court pour la plus petite taille de Manchette. Contactez nous à l'adresse : support@macu4.com
- Longueur (L) est comprise entre 120 et 200 mm, la Manchette SHT ("short" / courte) est alors recommandée.
- Longueur (L) > 200 mm, la Manchette STD (standard) est recommandée.

ÉTAPE 2 | Circonférence de la Manchette

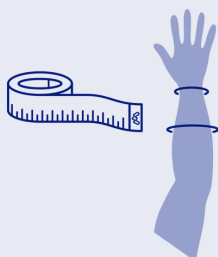

- La mesure 1 est prise au niveau du poignet.
- La mesure 2 est prise sur l'avant bras à environ 10 cm du poignet.

GUIDE DES TAILLES | Taille de la Manchette en fonction de la circonférence

| | Circonférence du poignet (distal) (mm) | | Circonférence à 10 cm du poignet (mm) | |
|------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| | min | max | min | max |
| Extra Small (XS) | 110 | 130 | 120 | 170 |
| Small (S) | 130 | 150 | 140 | 190 |
| Medium (M) | 150 | 180 | 190 | 240 |
| Large (L) | 180 | 200 | 240 | 330 |