

Guide rapide | Application en thérapie



Aperçu des domaines d'application en thérapie et et comment le Système Lynk peut favoriser l'accompagnement


Et si la compensation était la première étape vers l'activation ?

- Le Système Lynk ne remplace pas la fonction de la main – il la compense de manière ciblée.
- Cela ouvre la porte à des activités spécifiques autrement inaccessibles.
- En permettant des réussites, il génère de la motivation – pour essayer, s'entraîner, persévérer et découvrir.
- Et cela peut devenir un puissant moteur de changement fonctionnel.

Comment le Système Lynk aide-t-il en thérapie et au quotidien ?

- Le Système Lynk soutient les personnes ayant une fonction manuelle limitée – de façon temporaire ou permanente.
- Il est utilisé précisément lorsque la compensation ciblée permet davantage que l'entraînement pur ou la compensation classique.
- En thérapie, il ouvre de nouvelles voies vers une activité fonctionnelle – sans sursolliciter la main.
- Au quotidien, il favorise l'autonomie dans des situations concrètes.
- Selon l'objectif, il peut activer ou compenser – toujours avec le progrès en ligne de mire.

La compensation ciblée peut être l'étincelle qui permet le mouvement, stimule la motivation et met le développement en marche.

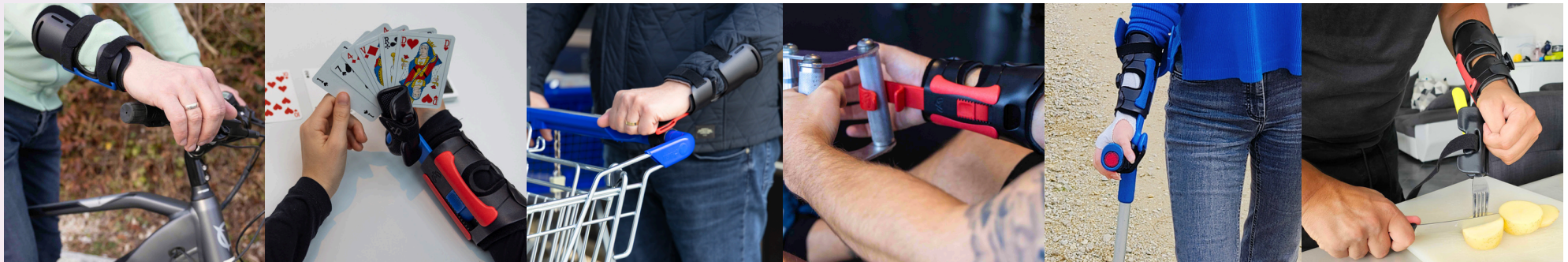

Guide rapide | Application en thérapie



Aperçu des domaines d'application en thérapie et comment le Système Lynk peut favoriser l'accompagnement

Entraînement et maintien de la fonction de la main |

L'objectif est de préserver ou d'améliorer les fonctions manuelles existantes. Grâce à sa fixation sur l'avant-bras, la mobilité du poignet et des doigts est en grande partie conservée. Cela permet à la main de rester fonctionnelle et utilisable.

Entraînement des muscles et articulations adjacents |

Le Système Lynk soulage la main et permet un entraînement ciblé du bras, de l'épaule, de la poitrine et du dos. Cela aide à prévenir des problèmes secondaires tels que les mauvaises postures ou l'atrophie musculaire, sans surcharger la main ni le poignet.

Options d'achat | Des solutions d'achat flexibles adaptées à vos besoins – du soutien temporaire pendant une thérapie (kit d'essai) aux solutions à long terme pour une autonomie au quotidien.

Amélioration de la mobilité | La mobilité est essentielle pour une vie autonome. Le Système Lynk facilite l'utilisation des béquilles, des déambulateurs ou des vélos, permettant ainsi une rééducation sans entrave des membres inférieurs. Cela peut accélérer la récupération, réduire la dépendance au fauteuil roulant et motiver les patient-e-s à rester actif-ve-s et à s'entraîner régulièrement.

Élargissement des possibilités d'activité | De nombreuses activités qui semblaient auparavant impossibles peuvent être à nouveau pratiquées avec le Système Lynk. Le mini-golf, le tir à l'arc, le kayak ou encore la cuisine en sont quelques exemples. Ces activités favorisent la participation sociale et améliorent la qualité de vie.

Renforcement de la confiance en soi | Souvent, la fonction manuelle restante est suffisante pour effectuer une activité, mais un manque de sécurité peut freiner l'action. Le système Lynk offre une stabilité supplémentaire et un sentiment de sécurité accru. Cela permet de surmonter les incertitudes, de renforcer la confiance en soi et de faciliter la participation active à la thérapie.